



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**



Субъектам обращения
медицинских изделий

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

22.09.2015 № 014-1542/15

На № _____ от _____

О правилах эксплуатации
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании поступивших сведений информирует о правилах эксплуатации медицинского изделия «Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСПП-ММ по ТУ 9451-009-10660186-2006 в составе:

- тележка-каталка ТНС-01ММ,
- носилки мягкие НМ-ММ,
- носилки кресельные НК-ММ,
- носилки ковшовые НКРЖ-ММ,
- носилки плащевые НП-ММ,
- носилки продольно складные НПС-ММ,
- носилки продольно и поперечно складные НППС-ММ,
- устройство приемное УП-ММ», производства ООО «НПП «МИКРОМОНТАЖ», Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09084 от 01.11.2010, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие).

Обращаем внимание, что нарушение правил по эксплуатации Медицинского изделия, указанных в информационном письме производителя (прилагается), создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении Медицинского изделия, при необходимости довести данную информацию до сотрудников и медицинского персонала, обеспечить контроль за соблюдением указанных правил.

Приложение: информационное письмо ООО «НПП «МИКРОМОНТАЖ» на 2 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие
«МИКРОМОНТАЖ»

✉ 603136, г. Нижний Новгород, а/я 58
✉ E-mail: mmonta@kis.ru www.mikromontazh.ru
☎ (831)4371344, 4169578, 2779749

Исх. № 293 от 15.09.2015 г.
ИНН 52 62 01 69 52 КПП 52 62 01 001
Расч. сч. № 407 028 106 420 500 00 208
Волго-Вятский банк Сбербанка России
корр. счет № 301 018 109 000 000 00 603
БИК 042 202 603 Код по ОКОНХ 14329 Код по ОКПО 10 660 186

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по эксплуатации МИ «Комплект средств перемещения и перевозки
пациентов КСПП-ММ по ТУ 9451-009-10660186-2006 в составе»

РУ № ФСР 2010/09084 от 01.11.2010

При эксплуатации тележек-каталок ТНС-01ММ (в дальнейшем –тележка) со съемными носилками (в дальнейшем-носилки) следует строго выполнять следующие правила:

1. Изучить и строго следовать указаниям руководства по эксплуатации на «Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСПП- ММ по ТУ 9451-009-10660186-2006 в составе».
2. К работе с тележкой допускается только специально обученный персонал. Для работы с тележкой необходимо не менее двух обученных операторов. Неумелые действия неподготовленных людей могут привести к травмам и повреждениям.
3. Перед началом смены ответственный за эксплуатацию оборудования должен провести тщательный осмотр тележки и проверку работоспособности механизмов.
4. Для поддержания работоспособности тележки следует предохранять ее от загрязнений и повреждений. Не реже, чем раз в три месяца производить очистку и обработку подшипниковых узлов, осей колесных опор, направляющих и фиксаторов силиконовыми смазками.

5. При транспортировке пациента необходимо:

- 5.1. проверить фиксацию носилок на тележке,
- 5.2. зафиксировать пациента на носилках ремнями безопасности,
- 5.3. зафиксировать боковые ограждения в верхнем положении.

6. Для погрузки тележки на устройство приемное необходимо с помощью рукояток управления механизмом расфиксации шасси установить тележку в крайнее верхнее положение.

7. ВНИМАНИЕ! РАСФИКСАЦИЯ ШАССИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ ТЕЛЕЖКИ ИЗ АВТОМОБИЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ (без ручного управления механизмом расфиксации).

Погрузка, выгрузка и транспортировка вне автомобиля тележки с пациентом должна осуществляться как минимум двумя операторами: один — со стороны ножной секции, второй, поддерживая раму головной секции, контролирует точность совмещения колес рамы тележки с устройством приемным и обеспечивает безопасность.

8. При выгрузке тележки из автомобиля для свободного раскладывания и четкой фиксации переднего шасси необходимо, чтобы зазор между колесом и грунтом должен быть не менее 50 мм.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕДНЕЕ ШАССИ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗЛОЖЕНО И ФИКСИРОВАНО ДО УСТАНОВКИ НА ГРУНТ.

ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ФИКСАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛЕЖКИ НА ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ!

9. Не оставлять тележку на незаторможенных колесах.

Директор



Л.Н.Кузьмин