



2449467

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74
www.roszdravnadzor.gov.ru

20.08.2021 № Одн - 1057/21

На № _____ от _____

О безопасности
медицинских изделий

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения субъектов обращения медицинского изделия письмо ООО «ФИЛИПС», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия, о новых данных по безопасности при применении медицинских изделий:

«Система компьютерной томографии Incisive CT с принадлежностями» производства «Филипс Хэлскеа (Сучжоу) Ко., Лтд», КНР, регистрационное удостоверение от 03.07.2019 № РЗН 2019/8563, срок действия не ограничен.

«Система компьютерной томографии Access CT с принадлежностями» производства «Филипс Хэлскеа (Сучжоу) Ко., Лтд», КНР, регистрационное удостоверение от 30.05.2018 № РЗН 2017/5582, срок действия не ограничен.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «ФИЛИПС» (123022 Москва, ул. Сергея Макеева, 13; тел.: +7(495) 937-93-00, +7(985) 729-95-50).

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

Приложение 1 к Информационному
письму Исх. № МС-21-024 от 11.03.2021

Уведомление о безопасности FSN-FCO72800745

2021-PD-CTAMI-005 FSN-FCO72800745 Ред:00

16 февраля 2021 г.

СРОЧНО - Уведомление о безопасности
Корректирующие действия в отношении медицинских изделий

Компьютерная томографическая рентгеновская система Incisive CT компании
«Филипс»

Механизм наклона гентри может выйти из строя, немедленно прекратите использование.

Уважаемый пользователь!

В системах Incisive CT производства компании «Филипс» обнаружена проблема, которая в случае возникновения может представлять риск для пациентов или пользователей. Настоящее Уведомление о безопасности FSN-FCO72800745 призвано проинформировать вас о следующем:

- в чем заключается проблема и при каких обстоятельствах она может возникать;
- действия, которые должен предпринять потребитель/пользователь для предотвращения рисков для пациентов и пользователей;
- действия, запланированные кластером прецизионной диагностики компании «Филипс» в Китае для устранения проблемы.

**Настоящее уведомление содержит важную информацию для продолжения
безопасного и надлежащего использования вашего оборудования.**

Просим вас ознакомиться со следующей информацией вместе со всеми вашими коллегами, которым необходимо знать содержание настоящего сообщения. Важно понять значение данного сообщения.

Если вам потребуется дополнительная информация или поддержка по данному вопросу, просим вас обращаться к местному представителю компании «Philips»:

ООО «ФИЛИПС», Отдел сервиса медицинских систем, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13.
Телефон бесплатной горячей линии - 8-800-200-0881 (Леонид Злоказов), при обращении в ООО «ФИЛИПС» по вопросам, касающимся данной неполадки, называйте номер данного письма – FSN-FCO72800745.

Компании «Philips» неизвестно о каких-либо случаях причинения вреда пользователю или пациенту, связанных с описанными выше дефектами.

О данном уведомлении было сообщено соответствующим регуляторным органам.

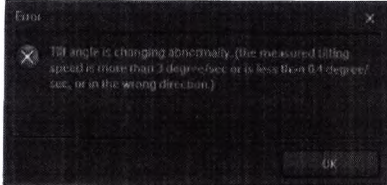
Компания «Филипс» приносит свои искренние извинения за любые неудобства, связанные с данной проблемой.

С уважением,



Ли Синь

Глава по вопросам качества и надежности, директор кластера прецизионной диагностики (ПД) компании «Филипс» в Китае

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ	Компьютерная томографическая рентгеновская система 728143 Incisive CT							
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ	Компания «Филипс» обнаружила проблему с приводами, используемыми в гентри компьютерного рентгеновского томографа Incisive CT, которая может привести к невозможности автоматической блокировки гентри в случае выхода из строя приводов, расположенных по обе стороны гентри. В некоторых случаях в системах с поврежденными компонентами гентри может медленно наклоняться вперед, в худшем случае, до предельного угла наклона + 31°.							
ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ	Возникновение такой проблемы потенциально может привести к следующим опасным ситуациям: - Полученные изображения могут не подтвердить клинический диагноз из-за неожиданного смещения гентри, влияющего на качество изображения, тогда, на основании профессионального решения, может потребоваться повторное сканирование пациента; или же, - Пациент (особенно с ожирением или без сознания) может войти в соприкосновение с гентри и, возможно, таким образом, застрять между гентри и столом, что, в свою очередь, может привести к серьезной травме или, в худшем случае, к смерти.							
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ	Компьютерные рентгеновские томографические системы Incisive CT с вышеуказанной проблемой перечислены в Приложении А «Системный SN (серийный номер) и UDI (уникальный идентификатор изделия)». Чтобы определить, имеет ли место проблема на вашей системе, проверьте системную маркировку своего рентгеновского томографа.							
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ПОТРЕБИТЕЛЬ	1. ПРЕКРАТИТЕ использование системы до выполнения корректирующих мероприятий FCO72800745. 2. После того, как сервисный представитель компании «Филипс» внедрит FCO72800745 (блокировка наклона гентри), и до того, как будет внедрен окончательный вариант FCO72800742 для замены привода, наклон гентри будет заблокирован физически. В случае, если вы случайно нажмете кнопку наклона на панели управления гентри или выполните протокол сканирования с наклоном гентри, система может выдать сообщение об ошибке в программном обеспечении консоли, как показано ниже:  Ошибка: Чрезмерное изменение угла наклона. (Измеренная скорость наклона составляет более 3 градусов/сек или менее 0,4 градуса/сек, либо в неправильном направлении.) Рисунок 1 - Сообщение об ошибке в пользовательском интерфейсе консоли при случайном использовании функции наклона после механической блокировки гентри В случае получения сообщения о такой ошибке, выполните следующие действия для возобновления клинического использования: <table><tr><th>№</th><th>Сценарий</th><th>Контрмера</th></tr><tr><td>1</td><td>Если нажата и удерживается кнопка наклона на панели управления, система сообщает об ошибке, как показано на рисунке 1</td><td>В случае высвечивания сообщения об ошибке, нажмите ОК, чтобы удалить ошибку автоматически. Сканер может продолжать работать.</td></tr></table>		№	Сценарий	Контрмера	1	Если нажата и удерживается кнопка наклона на панели управления, система сообщает об ошибке, как показано на рисунке 1	В случае высвечивания сообщения об ошибке, нажмите ОК, чтобы удалить ошибку автоматически. Сканер может продолжать работать.
№	Сценарий	Контрмера						
1	Если нажата и удерживается кнопка наклона на панели управления, система сообщает об ошибке, как показано на рисунке 1	В случае высвечивания сообщения об ошибке, нажмите ОК, чтобы удалить ошибку автоматически. Сканер может продолжать работать.						

	<table><tr><td>2</td><td>Выполняется протокол сканирования с наклоном гентри, система сообщает об ошибке как показано на рисунке 1</td><td>Шаг 1: Нажмите ОК, чтобы автоматически удалить сообщение об ошибке. Шаг 2: Измените угол наклона гентри в протоколе на ноль. В этом случае система может продолжать работать без функции наклона.</td></tr></table>	2	Выполняется протокол сканирования с наклоном гентри, система сообщает об ошибке как показано на рисунке 1	Шаг 1: Нажмите ОК, чтобы автоматически удалить сообщение об ошибке. Шаг 2: Измените угол наклона гентри в протоколе на ноль. В этом случае система может продолжать работать без функции наклона.
2	Выполняется протокол сканирования с наклоном гентри, система сообщает об ошибке как показано на рисунке 1	Шаг 1: Нажмите ОК, чтобы автоматически удалить сообщение об ошибке. Шаг 2: Измените угол наклона гентри в протоколе на ноль. В этом случае система может продолжать работать без функции наклона.		
	3. См. Приложение В , где приведены временные решения по организации рабочего процесса на время блокировки наклона гентри и перед заменой привода.			
ДЕЙСТВИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ «ФИЛИПС»	Компания «Филипс» выполнит корректирующее мероприятие FCO72800745 для блокировки функции наклона гентри, запланированное на март 2021 г., чтобы немедленно устранить вышеупомянутую потенциально опасную ситуацию и вернуть системы в клиническое применение. Компания «Филипс» выполнит мероприятие FCO72800742 для замены поврежденных приводов и восстановления нормальной функции наклона гентри. Представитель компании «Филипс» свяжется с вами, чтобы назначить дату корректирующих мероприятий. Оба корректирующих мероприятия FCO72800745 и FCO72800742 будут осуществляться бесплатно.			
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА	Если вам потребуется дополнительная информация или поддержка по данному вопросу, просим вас обращаться к местному представителю компании «Philips»: ООО «ФИЛИПС», Отдел сервиса медицинских систем, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13. Телефон бесплатной горячей линии - 8-800-200-0881 (Леонид Злоказов), при обращении в ООО «ФИЛИПС» по вопросам, касающимся данной неполадки, называйте номер данного письма – FSN-FCO72800745.			

Приложение А - Список систем, подлежащих модификации

№	Серийный номер системы	Уникальный идентификатор системы	№	Серийный номер системы	Уникальный идентификатор системы
1	500048	(01)00884838085015(21)500048	36	530107	(01)00884838085015(21)530107
2	500225	(01)00884838085015(21)500225	37	530108	(01)00884838085015(21)530108
3	500226	(01)00884838085015(21)500226	38	530109	(01)00884838085015(21)530109
4	500227	(01)00884838085015(21)500227	39	530113	(01)00884838085015(21)530113
5	500229	(01)00884838085015(21)500229	40	530117	(01)00884838085015(21)530117
6	500231	(01)00884838085015(21)500231	41	530118	(01)00884838085015(21)530118
7	500233	(01)00884838085015(21)500233	42	530119	(01)00884838085015(21)530119
8	500241	(01)00884838085015(21)500241	43	530120	(01)00884838085015(21)530120
9	500244	(01)00884838085015(21)500244	44	530121	(01)00884838085015(21)530121
10	500245	(01)00884838085015(21)500245	45	530124	(01)00884838085015(21)530124
11	500246	(01)00884838085015(21)500246	46	530125	(01)00884838085015(21)530125
12	500247	(01)00884838085015(21)500247	47	530126	(01)00884838085015(21)530126
13	500248	(01)00884838085015(21)500248	48	530127	(01)00884838085015(21)530127
14	500252	(01)00884838085015(21)500252	49	530128	(01)00884838085015(21)530128
15	500254	(01)00884838085015(21)500254	50	530129	(01)00884838085015(21)530129
16	500255	(01)00884838085015(21)500255	51	530130	(01)00884838085015(21)530130
17	500256	(01)00884838085015(21)500256	52	530132	(01)00884838085015(21)530132
18	500257	(01)00884838085015(21)500257	53	530133	(01)00884838085015(21)530133
19	500258	(01)00884838085015(21)500258	54	530134	(01)00884838085015(21)530134
20	500261	(01)00884838085015(21)500261	55	530135	(01)00884838085015(21)530135
21	500263	(01)00884838085015(21)500263	56	530136	(01)00884838085015(21)530136
22	500264	(01)00884838085015(21)500264	57	530137	(01)00884838085015(21)530137
23	500265	(01)00884838085015(21)500265	58	530138	(01)00884838085015(21)530138
24	500269	(01)00884838085015(21)500269	59	530139	(01)00884838085015(21)530139
25	500270	(01)00884838085015(21)500270	60	530140	(01)00884838085015(21)530140
26	500273	(01)00884838085015(21)500273	61	530141	(01)00884838085015(21)530141
27	500274	(01)00884838085015(21)500274	62	530142	(01)00884838085015(21)530142
28	500276	(01)00884838085015(21)500276	63	530143	(01)00884838085015(21)530143
29	500278	(01)00884838085015(21)500278	64	530144	(01)00884838085015(21)530144
30	500282	(01)00884838085015(21)500282	65	530145	(01)00884838085015(21)530145
31	500286	(01)00884838085015(21)500286	66	530146	(01)00884838085015(21)530146
32	530004	(01)00884838085015(21)530004	67	530147	(01)00884838085015(21)530147
33	530101	(01)00884838085015(21)530101	68	530148	(01)00884838085015(21)530148
34	530102	(01)00884838085015(21)530102	69	530149	(01)00884838085015(21)530149
35	530103	(01)00884838085015(21)530103	70	530150	(01)00884838085015(21)530150

PHILIPS

№	Серийный номер системы	Уникальный идентификатор системы
71	530151	(01)00884838085015(21)530151
72	530152	(01)00884838085015(21)530152
73	530153	(01)00884838085015(21)530153
74	530154	(01)00884838085015(21)530154
75	530156	(01)00884838085015(21)530156
76	530157	(01)00884838085015(21)530157
77	530158	(01)00884838085015(21)530158
78	530159	(01)00884838085015(21)530159
79	530160	(01)00884838085015(21)530160
80	530161	(01)00884838085015(21)530161
81	530162	(01)00884838085015(21)530162
82	530163	(01)00884838085015(21)530163
83	530164	(01)00884838085015(21)530164
84	530165	(01)00884838085015(21)530165
85	530166	(01)00884838085015(21)530166
86	530167	(01)00884838085015(21)530167
87	530168	(01)00884838085015(21)530168
88	530169	(01)00884838085015(21)530169
89	530170	(01)00884838085015(21)530170
90	530171	(01)00884838085015(21)530171
91	530172	(01)00884838085015(21)530172
92	530173	(01)00884838085015(21)530173
93	530174	(01)00884838085015(21)530174
94	530176	(01)00884838085015(21)530176
95	530177	(01)00884838085015(21)530177
96	530179	(01)00884838085015(21)530179
97	530185	(01)00884838085015(21)530185
98	530196	(01)00884838085015(21)530196
99	530200	(01)00884838085015(21)530200
100	530201	(01)00884838085015(21)530201
101	530211	(01)00884838085015(21)530211
102	530212	(01)00884838085015(21)530212
103	530219	(01)00884838085015(21)530219
104	530221	(01)00884838085015(21)530221

Приложение В - Временные решения для особых клинических требований, связанных с наклоном

После того, как будет осуществлено корректирующее мероприятие FCO72800745 для блокировки наклона гентри, и до того, как будет осуществлено окончательное мероприятие FCO72800742 для замены приводов, система будет ограничена в некоторых клинических рабочих процессах ввиду ограничения наклона гентри. Чтобы обойти ограничения, следуйте нижеприведенным временным решениям:

1. Для использования наклона гентри при сканировании головы и шеи

Общие протоколы сканирования с использованием наклона гентри:

Протоколы для взрослых:

1. Аксиальная томография головного мозга 2D (Brain 2D axial)
2. Аксиальная томография головного мозга (Brain Axial)
3. Перфузия головного мозга без челночного режима (Brain Perfusion Non-Jog)
4. Аксиальная томография ПФ (PF Axial)

Протоколы для детей/младенцев:

1. Аксиальная томография головного мозга младенца 2D 0-18м (Inf Brain Axial 2D 0-18m)
2. Аксиальная томография головного мозга 2D 18м-6у (Brain Axial 2D 18m-6y)
Аксиальная томография головного мозга \n6yrs+ (Brain Axial\n6yrs+)

Протокол сканирования височной кости:

1. Аксиальная томография внутреннего слухового канала 2D (IAC Axial 2D)

Устройство может выполнять аналогичные клинические задачи, следуя нижеприведенным обходным временным решениям:

Вариант 1:

1. Используйте подголовник, чтобы расположить голову пациента.
2. Используйте позиционирующие лазеры в гентри, чтобы проверить, получен ли необходимый угол.
 - Если горизонтальный лазерный луч проходит через орбитомеатальную линию, сканирование будет выполняться в орбитомеатальной плоскости.
 - Прямое воздействие рентгеновских лучей на глаза можно свести к минимуму.

Вариант 2:

1. Выберите аксиальный или спиральный протокол выполнения сканирования.
2. Добавьте реконструкцию с тонкой толщиной среза и реконструкцию с перекрытием. Для головного мозга и задней черепной ямки рекомендуемая толщина среза составляет 1 мм или меньше. Для сканирования ушного слухового отверстия рекомендуемая толщина среза составляет 0,9 мм или меньше.
3. Загрузите данные изображения тонких срезов в МПР и создайте нужный пакет в нужной плоскости.

***Предостережение:** Данные о перфузии головного мозга не могут быть загружены в МПР, поэтому вариант 2 к перфузии головного мозга не применим.

2. Для использования наклона гентри при сканировании позвоночника

Стандартный протокол сканирования с использованием наклона гентри:

Аксиальная томография позвоночника (используется для дисков позвоночника) (Spine Axial)

Устройство может выполнять аналогичную клиническую задачу, следуя нижеприведенным обходным временным решениям:

1. Для выполнения сканирования, выберите спиральный протокол сканирования позвоночника.
2. Добавьте реконструкцию с тонкой толщиной среза и реконструкцию с перекрытием. Рекомендуемая толщина среза не более 1 мм.
3. Загрузите данные изображения тонких срезов в МПР.
4. Для создания пакета используйте пакетные предустановки (поясничный или шейный диск).
5. Выберите необходимую толщину и шаг среза.

PHILIPS

6. При необходимости отрегулируйте угол наклона для пакета.
7. Обозначьте диски и сохраните их в нужном месте.

3. Для использования наклона гентри при компьютерной томографии CCT (Continuous CT) scan

Стандартный протокол сканирования с использованием наклона гентри:

Сканирование методом НКТ (непрерывная КТ)

Устройство может выполнять аналогичную клиническую задачу, следуя нижеприведенным обходным временным решениям:

1. Используйте подушку, чтобы расположить тело пациента в требуемой плоскости наклона.
2. Убедитесь, что подушка не попадает в поле сканирования.
3. Используйте позиционирующие лазеры в гентри, чтобы проверить, получен ли необходимый угол.
Пример. Вертикальный лазер, проходящий через иглу, означает, что игла расположена под углом параллельно плоскости сканирования.

СРОЧНО - Уведомление о безопасности Корректирующие действия в отношении медицинских изделий

**Компьютерные томографические рентгеновские системы
Incisive CT и Access CT компании «Филипс»
Возможный выход из строя механизма вертикального движения стола**

Уважаемый пользователь!

В системах Incisive CT и Access CT производства компании «Филипс» была обнаружена проблема, которая в случае возникновения может представлять риск для пациентов или пользователей. Настоящее Уведомление о безопасности FSN-FCO72800742/743 призвано проинформировать Вас о следующем:

- в чем заключается проблема и при каких обстоятельствах она может возникать;
- действия, которые должен предпринять потребитель/пользователь для предотвращения рисков для пациентов и пользователей;
- действия, запланированные кластером прецизионной диагностики компании «Филипс» в Китае для устранения проблемы.

**Настоящее уведомление содержит важную информацию для продолжения
безопасного и надлежащего использования вашего оборудования.**

Просим вас ознакомиться со следующей информацией вместе со всеми вашими коллегами, которым необходимо знать содержание настоящего сообщения. Важно понять значение данного сообщения.

Если вам потребуется дополнительная информация или поддержка по данному вопросу, просим вас обращаться к местному представителю компании «Philips»:

ООО «ФИЛИПС», Отдел сервиса медицинских систем, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13. Телефон бесплатной горячей линии - 8-800-200-0881 (Леонид Злоказов), при обращении в ООО «ФИЛИПС» по вопросам, касающимся данной неполадки, называйте номер данного письма – FSN-FCO72800742/743.

О данном уведомлении было сообщено соответствующим регуляторным органам.

Компания «Филипс» приносит свои искренние извинения за любые неудобства, связанные с данной проблемой.

С уважением,

Ли Синь

Глава по вопросам качества и надежности, директор кластера прецизионной диагностики компании «Филипс» в Китае

PHILIPS

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ	Компьютерная томографическая рентгеновская система 728143 Incisive CT Компьютерная томографическая рентгеновская система 728116 Access CT
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ	Компания «Филипс» обнаружила проблему с приводами, используемых в столах компьютерных томографических рентгеновских систем Incisive CT и Access CT, которая может привести к неожиданному медленному опусканию стола в его крайнее положение.
ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ	В случае неожиданного опускания стола могут возникнуть следующие опасные ситуации - Полученные изображения могут не подтвердить клинический диагноз из-за неожиданного вертикального смещения стола, влияющего на качество изображения, тогда, на основании профессионального решения, может потребоваться повторное сканирование пациента; или же, - Во время интервенционного сканирования из-за неожиданного опускания стола игла может выдернуться или вытянуться наружу, что может привести к травме пациента или временному ухудшению его состояния, требующему профессионального медицинского вмешательства.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ	Компьютерные томографические рентгеновские системы Incisive CT и Access CT с потенциальными повреждениями механизмов стола перечислены в Приложении А с системным SN (серийным номером) и UDI (уникальным идентификатором изделия). Чтобы определить, наличие проблемы на вашей системе, проверьте системную маркировку своего рентгеновского томографа.
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ПОТРЕБИТЕЛЬ	Во время работы системы отслеживайте вертикальное смещение стола через CT-box или панель управления гентри UI (пользовательский интерфейс). Если наблюдается произвольное опускание стола, ПРЕКРАТИТЕ использование устройства и немедленно обратитесь к местному представителю компании «Филипс».
ДЕЙСТВИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ «ФИЛИПС»	Для замены поврежденных механизмов стола компания «Филипс» выполнит корректирующие мероприятия FCO72800742 для Incisive CT и FCO72800743 для Access CT во втором квартале 2021 года. Представитель компании «Филипс» свяжется с вами, чтобы назначить дату корректирующего мероприятия. Оба корректирующие мероприятия FCO72800742 и FCO72800743 будут осуществляться бесплатно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА	Если вам потребуется дополнительная информация или поддержка по данному вопросу, просим вас обращаться к местному представителю компании «Philips»: ООО «ФИЛИПС», Отдел сервиса медицинских систем, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13. Телефон бесплатной горячей линии - 8-800-200-0881 (Леонид Злоказов), при обращении в ООО «ФИЛИПС» по вопросам, касающимся данной неполадки, называйте номер данного письма – FSN-FCO72800742/743.

PHILIPS

Приложение А - Список систем, подлежащих модификации

№	Номер изделия	Серийный номер системы	Уникальный идентификатор системы
1	728116 Access CT	304034	(01)00884838059849(21)304034
2	728116 Access CT	325078	(01)00884838059849(21)325078
3	728143 Incisive CT	500218	(01)00884838085015(21)500218
4	728143 Incisive CT	500219	(01)00884838085015(21)500219
5	728143 Incisive CT	500221	(01)00884838085015(21)500221
6	728143 Incisive CT	500222	(01)00884838085015(21)500222
7	728143 Incisive CT	500223	(01)00884838085015(21)500223
8	728143 Incisive CT	500224	(01)00884838085015(21)500224
9	728143 Incisive CT	500225	(01)00884838085015(21)500225
10	728143 Incisive CT	500226	(01)00884838085015(21)500226
11	728143 Incisive CT	500227	(01)00884838085015(21)500227
12	728143 Incisive CT	500229	(01)00884838085015(21)500229
13	728143 Incisive CT	500231	(01)00884838085015(21)500231
14	728143 Incisive CT	500232	(01)00884838085015(21)500232
15	728143 Incisive CT	500233	(01)00884838085015(21)500233
16	728143 Incisive CT	500234	(01)00884838085015(21)500234
17	728143 Incisive CT	500237	(01)00884838085015(21)500237
18	728143 Incisive CT	500238	(01)00884838085015(21)500238
19	728143 Incisive CT	500239	(01)00884838085015(21)500239
20	728143 Incisive CT	500241	(01)00884838085015(21)500241
21	728143 Incisive CT	500242	(01)00884838085015(21)500242
22	728143 Incisive CT	500245	(01)00884838085015(21)500245
23	728143 Incisive CT	500247	(01)00884838085015(21)500247
24	728143 Incisive CT	500248	(01)00884838085015(21)500248
25	728143 Incisive CT	500249	(01)00884838085015(21)500249
26	728143 Incisive CT	500251	(01)00884838085015(21)500251
27	728143 Incisive CT	500252	(01)00884838085015(21)500252
28	728143 Incisive CT	500254	(01)00884838085015(21)500254
29	728143 Incisive CT	500255	(01)00884838085015(21)500255
30	728143 Incisive CT	500256	(01)00884838085015(21)500256
31	728143 Incisive CT	500257	(01)00884838085015(21)500257
32	728143 Incisive CT	500258	(01)00884838085015(21)500258
33	728143 Incisive CT	500261	(01)00884838085015(21)500261
34	728143 Incisive CT	500264	(01)00884838085015(21)500264
35	728143 Incisive CT	500274	(01)00884838085015(21)500274
36	728143 Incisive CT	500283	(01)00884838085015(21)500283
37	728143 Incisive CT	500296	(01)00884838085015(21)500296
38	728143 Incisive CT	530038	(01)00884838085015(21)530038
39	728143 Incisive CT	530067	(01)00884838085015(21)530067
40	728143 Incisive CT	530071	(01)00884838085015(21)530071
41	728143 Incisive CT	530098	(01)00884838085015(21)530098

PHILIPS

42	728143 Incisive CT	530099	(01)00884838085015(21)530099
43	728143 Incisive CT	530101	(01)00884838085015(21)530101
44	728143 Incisive CT	530103	(01)00884838085015(21)530103
45	728143 Incisive CT	530104	(01)00884838085015(21)530104
46	728143 Incisive CT	530106	(01)00884838085015(21)530106
47	728143 Incisive CT	530107	(01)00884838085015(21)530107
48	728143 Incisive CT	530108	(01)00884838085015(21)530108
49	728143 Incisive CT	530109	(01)00884838085015(21)530109
50	728143 Incisive CT	530111	(01)00884838085015(21)530111
51	728143 Incisive CT	530112	(01)00884838085015(21)530112
52	728143 Incisive CT	530113	(01)00884838085015(21)530113
53	728143 Incisive CT	530114	(01)00884838085015(21)530114
54	728143 Incisive CT	530115	(01)00884838085015(21)530115
55	728143 Incisive CT	530116	(01)00884838085015(21)530116
56	728143 Incisive CT	530117	(01)00884838085015(21)530117
57	728143 Incisive CT	530118	(01)00884838085015(21)530118
58	728143 Incisive CT	530119	(01)00884838085015(21)530119
59	728143 Incisive CT	530120	(01)00884838085015(21)530120
60	728143 Incisive CT	530121	(01)00884838085015(21)530121
61	728143 Incisive CT	530124	(01)00884838085015(21)530124
62	728143 Incisive CT	530126	(01)00884838085015(21)530126
63	728143 Incisive CT	530127	(01)00884838085015(21)530127
64	728143 Incisive CT	530128	(01)00884838085015(21)530128
65	728143 Incisive CT	530129	(01)00884838085015(21)530129
66	728143 Incisive CT	530130	(01)00884838085015(21)530130
67	728143 Incisive CT	530132	(01)00884838085015(21)530132
68	728143 Incisive CT	530133	(01)00884838085015(21)530133
69	728143 Incisive CT	530134	(01)00884838085015(21)530134
70	728143 Incisive CT	530135	(01)00884838085015(21)530135
71	728143 Incisive CT	530136	(01)00884838085015(21)530136
72	728143 Incisive CT	530137	(01)00884838085015(21)530137
73	728143 Incisive CT	530138	(01)00884838085015(21)530138
74	728143 Incisive CT	530141	(01)00884838085015(21)530141
75	728143 Incisive CT	530148	(01)00884838085015(21)530148
76	728143 Incisive CT	530150	(01)00884838085015(21)530150
77	728143 Incisive CT	530152	(01)00884838085015(21)530152
78	728143 Incisive CT	530156	(01)00884838085015(21)530156
79	728143 Incisive CT	530157	(01)00884838085015(21)530157
80	728143 Incisive CT	530159	(01)00884838085015(21)530159
81	728143 Incisive CT	530160	(01)00884838085015(21)530160
82	728143 Incisive CT	530163	(01)00884838085015(21)530163
83	728143 Incisive CT	530165	(01)00884838085015(21)530165
84	728143 Incisive CT	530166	(01)00884838085015(21)530166
85	728143 Incisive CT	530167	(01)00884838085015(21)530167
86	728143 Incisive CT	530169	(01)00884838085015(21)530169
87	728143 Incisive CT	530170	(01)00884838085015(21)530170

PHILIPS

88	728143 Incisive CT	530171	(01)00884838085015(21)530171
89	728143 Incisive CT	530172	(01)00884838085015(21)530172
90	728143 Incisive CT	530173	(01)00884838085015(21)530173
91	728143 Incisive CT	530174	(01)00884838085015(21)530174
92	728143 Incisive CT	530175	(01)00884838085015(21)530175
93	728143 Incisive CT	530176	(01)00884838085015(21)530176
94	728143 Incisive CT	530177	(01)00884838085015(21)530177
95	728143 Incisive CT	530178	(01)00884838085015(21)530178
96	728143 Incisive CT	530180	(01)00884838085015(21)530180
97	728143 Incisive CT	530181	(01)00884838085015(21)530181
98	728143 Incisive CT	530182	(01)00884838085015(21)530182
99	728143 Incisive CT	530183	(01)00884838085015(21)530183
100	728143 Incisive CT	530186	(01)00884838085015(21)530186
101	728143 Incisive CT	530187	(01)00884838085015(21)530187
102	728143 Incisive CT	530188	(01)00884838085015(21)530188
103	728143 Incisive CT	530189	(01)00884838085015(21)530189
104	728143 Incisive CT	530190	(01)00884838085015(21)530190
105	728143 Incisive CT	530191	(01)00884838085015(21)530191
106	728143 Incisive CT	530192	(01)00884838085015(21)530192
107	728143 Incisive CT	530194	(01)00884838085015(21)530194
108	728143 Incisive CT	530197	(01)00884838085015(21)530197
109	728143 Incisive CT	530198	(01)00884838085015(21)530198