



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

25.05.2026 № 014-497/26

На № _____ от _____

О безопасности
медицинских изделий



2642826

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения государственной функции по мониторингу безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации, доводит до сведения письмо ООО «Дрегер» о новых данных по безопасности при применении медицинского изделия «Анестезиологическая рабочая станция Atlan, с принадлежностями», производства «Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА» (Германия) (регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14776 от 17.06.2022).

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Дрегер» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Dräger

Техника для жизни

Всем пользователям анестезиологической
рабочей станции Atlan с принадлежностями
РУ № РЗН 2021/14776

Контакты:

Телефон
+7 495 775-15-20(22)

E-mail
info.russia@draeger.com

Важная информация о работе отдельных анестезиологических рабочих станций Dräger Atlan

Май 2026

Уважаемые клиенты,

Настоящим письмом уведомляем Вас, что в рамках послепродажного контроля Производителю стало известно о единичных случаях, когда анестезиологическая рабочая станция Atlan (далее – Atlan) генерировала аварийный сигнал об отказе поршневого вентилятора перед использованием, либо об отказе механической вентиляции во время использования. Информации о причинении вреда здоровью пациентам не поступало.

Производителем было установлено, что эти случаи связаны с единичными ошибками в процессе сборки электроники двигателя у отдельных рабочих станций.

Если сигнал возникает перед использованием, например, в режиме ожидания или тестирования системы, механическая вентиляция не запускается. Если сигнал возникает во время вентиляции, механическая вентиляция может быть остановлена и сгенерировано сообщение "Ошибка вентилятора!!!". Ручная вентиляция или спонтанное дыхание остаются доступными в обоих случаях. При постоянной сигнализации о сбое вентиляции Atlan продолжает обеспечивать режим вентиляции Map/Spon, подачу свежего газа и анестетиков, а также функции мониторинга без ограничений.

Для продолжения штатной эксплуатации Atlan просим Вас соблюдать следующие рекомендации:

- Эксплуатируйте Atlan под постоянным наблюдением в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Если механическая вентиляция невозможна, используйте режим вентиляции Map/Spon, чтобы вентилировать пациента при необходимости.
- При необходимости вы можете понизить приоритет сигнала тревоги "Ошибка вентилятора!!!" с помощью функции "ALARM RESET".

ООО «Дрегер»

ОГРН 1027739271493
ИНН 7710312462
КПП 771801001
КОД ОКПО 61094221
КОД ОКОНХ 71200
СКВЭД 52.48

Адрес местонахождения:
107061, г. Москва, пл.
Преображенская, 8, эт. 12, пом. III

Основной офис

Адрес для корреспонденции:
107061, Москва, пл. Преображенская,
8. Бизнес Центр ПРЕОБ, блок «Б»,
эт. 12

Контактная информация:
info.russia@draeger.com
+ 7 495 775-15-20(22)

Сервисный центр

Адрес для корреспонденции:
109052, Москва, Новохоловская ул.,
д. 23, стр. 1, эт. 1

Контактная информация:
service.russia@draeger.com
+ 7 495 775-15-20(22) доб. 2

Информация о производителе

Drägerwerk AG & Co. KGaA
23542 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

www.draeger.com

Просим вас убедиться, что данная информация доведена до сведения персонала медицинского учреждения, заполнив **Форму пользователя** в приложении к данному Уведомлению.

В случае возникновения любых вопросов Вы можете обратиться в сервисный центр ООО «Дрегер» по электронной почте service.russia@draeger.com или по телефону +7 495 7751520.

Приносим свои извинения за возможные неудобства, которые могут возникнуть и благодарим Вас за понимание.

С уважением,
Заместитель директора сервисного центра по техническим вопросам ООО «Дрегер»
Сафронов А.Ю.



Исполнитель: менеджер по качеству Стебакова Е.В.
Elena.stebakova@draeger.com +7(495)7751520 доб. 233